

Flexibilní zástěny jsou navrženy tak, aby splňovaly **hygienické normy** a pomáhaly **předcházet šíření infekcí**. Mají hladký povrch, který se snadno udržuje a zvládne časté čištění. Rám je z odolného eloxovaného hliníku, ostatní kovové části jsou chráněny práškovým lakem. Samotný panel je z pevné polyesterové látky.



VHODNÉ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

Pro zajištění dlouhé životnosti a optimální kvality flexibilních zástěn **doporučujeme pravidelné používání následujících dezinfekčních přípravků:**



Bacillol® 30
Sensitive Tissues
80 ks



Mikrocid® Sensitive
wipes 200 ks



Desprej® Sensitive
500 ml



Bacillol® 30
Sensitive Foam
750 ml

Tyto prostředky efektivně odstraňují nežádoucí mikroorganismy a zároveň pomáhají chránit materiály před poškozením - prodlužují jejich funkčnost a estetickou hodnotu.



Všechny vhodné přípravky máme v naší nabídce. Objednat můžete telefonicky, e-mailem, nebo u svého obchodního zástupce.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Důkladné (hloubkové) čištění se doporučuje provádět každé 3 až 4 měsíce. Při tomto čištění je potřeba zástěnu zcela roztáhnout a vyčistit i vnitřní části rámu.



PŘI ČIŠTĚNÍ FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNY NEPOUŽÍVEJTE:

- Vosky ani rozpouštědla.
- Přípravky s abrazivním (hrubým) povrchem, jako je ocelová vlna.
- Čisticí prostředky, které mohou vytvářet usazeniny nebo obsahují syntetické látky.
- Alkalické prostředky s pH vyšším než 10.
- Rozpouštědla (chemická).
- Benzín.
- Tuhy nebo oleje.
- Drsné houbičky nebo čisticí prášky určené do kuchyně – zejména na potišťený panel.
- Ostré předměty nebo žiletky k seškrabávání povrchu.

Zástěnu nečistěte na přímém slunci ani při vysokých teplotách.

Při čištění nepoužívejte zbytečně tlak, zástěnu stačí jen lehce setřít.

Po čištění nechte zástěnu otevřenou, dokud zcela neuschne.